

Datum: 18. 4. 2019

Izdelek: Ligeri, Lahek sprehajalnik (rolator)

Identifikacija predmetnih izdelkov: Izdelka s številko artikla 322NPU (višina sedeža 56 cm) ter 323NPU (višina sedeža 52 cm), oba s serijsko številko 346V XXXXXX in datumom proizvodnje med 2014 do vključno 2018

Pošiljatelj/kontaktna oseba: DIETZ GmbH Reha-Produkte
Reutäckstraße 12
76307 Karlsbad
Servis: Jürgen Ketschek, tel.: +49 7248-9186 65
Odgovorni za varnost: Maximilian Raab, tel.: +49 7248 -9186 33


Naslovník: Specializirane trgovine z zdravstveno opremo in ustanove, ki so nabavile predmetne izdelke.

Opis težave in vzrok: Če sta nastavljivi držali za roke do konca izvlečeni, obstajajo pri uporabi na neravni podlagi naslednje nevarnosti:

- sprehajalnik (rolator) se lahko prekucne nazaj,
- sprehajalnik (rolator) se lahko prekucne na desno ali levo stran,
- sprehajalnik (rolator) lahko z zgornjega roba zdrsne (na višino spodnjega dela vstavljenih nastavljivih drsnih držal).

V bistvu je vzrok v nastavitvi nastavljivih držal po dolžini.

Potrebni ukrepi: Maksimalna izvlečna dolžina nastavljivih držal je na obeh straneh drugi najvišji položaj (položaj 5). Najvišjega položaja (položaj 6) ne smete uporabljati:

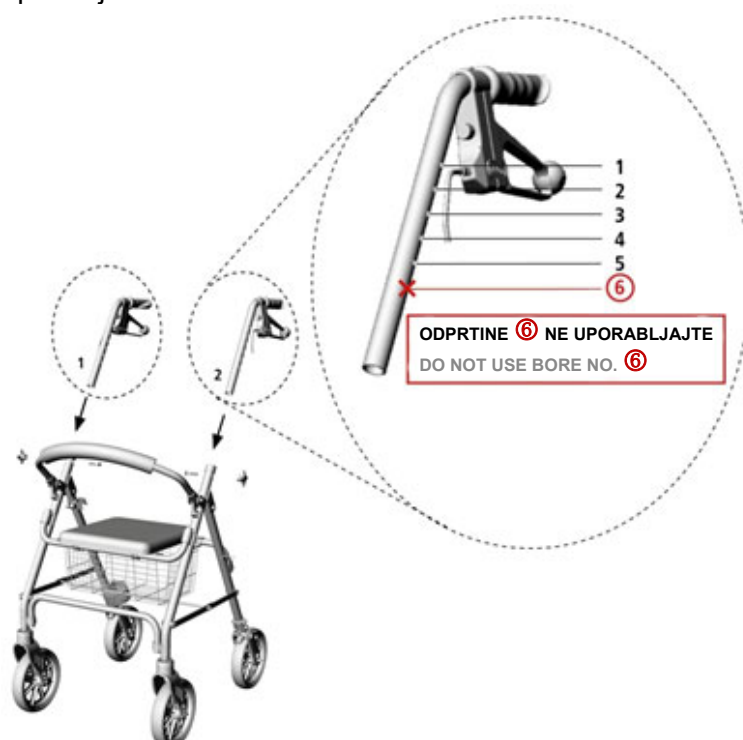

S to omejitvijo zmanjšate možnost padca nazaj in zdrs zgornjega roba.

Pri nastavitvi položaja 5 sta nastavljivi držali na višini 865 mm. Praviloma zadostuje nastavitev nastavljivih držal na položaj 5 za telesno višino najmanj 175 cm.

Če ta nastavitev višine nastavljivih držal ne bi zadostovala vaši višini, se obrnite na svojega trgovca in se dogovorite, da bo poskrbel za zamenjavo nastavljivih držal.

Poleg tega vas opozarjamo, da smo navodila za uporabo dopolnili z navodili za servisiranje in nego izdelka ter varnostnimi opozorili. Za sprehajalnike (rolatorje) velja 5-letna garancijska doba, če izdelek uporabljate v skladu z določili in upoštevate naša navodila za servisiranje in varnostna opozorila. Obvezno morate upoštevati opozorilo navodilih za uporabo, ki velja vse od prve dobave **"Sprehajalnik (rolator) Ligeró smete uporabljati samo na trdnih in ravnih tleh"**.

Trenutno veljavna navodila za uporabo najdete na spletni strani na povezavi: **bit.ly/bda_ligero**

Poskrbite, da bodo vaši zaposleni in kupci seznanjeni s tem nujnim varnostnim obvestilom.

Kupce, ki so predmetne izdelke prejeli pri nas, bomo obvestili mi.

To obvestilo hranite, dokler ukrep ne bo zaključen.

Maximilian Raab
Direktor in
odgovorni za varnost